

Know My Gut



Il secondo cervello: la chiave del tuo potenziale

Istruzioni per l'uso

**Prepararsi al prelievo
del campione di feci**

**Come prelevare i
campioni di feci**

**Attivazione del test
e spedizione del
vostro campione**

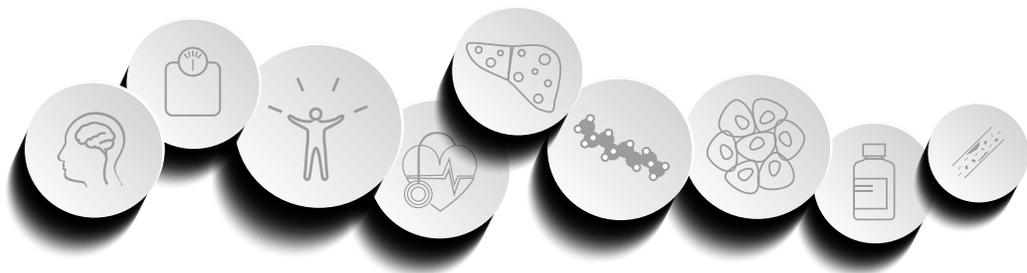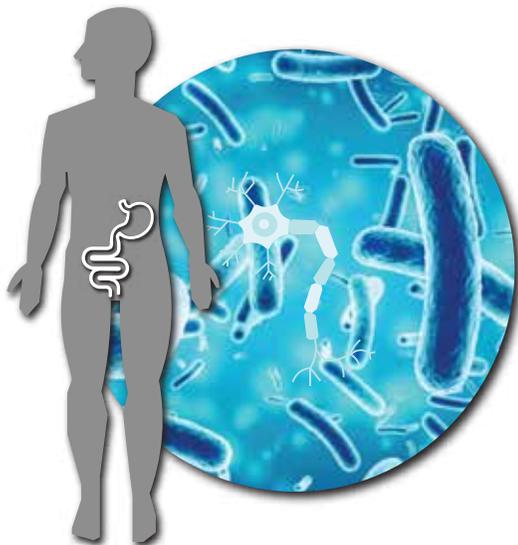

Velocità



Risultati accurati



Riservato



Affidabile

Per maggiori informazioni visita: www.knowmygut.it

Passo 1 - Prepararsi al prelievo del campione intestinale

Cosa contiene il kit per il test dell'intestino e spiegazione di tutto ciò di cui avete bisogno prima di iniziare



1 x Tubo di raccolta con codice a barre



1 x Raccogliatore feci




1 x Sacco per il rischio biologico



1 x Guanti



Busta dove inserire il campione

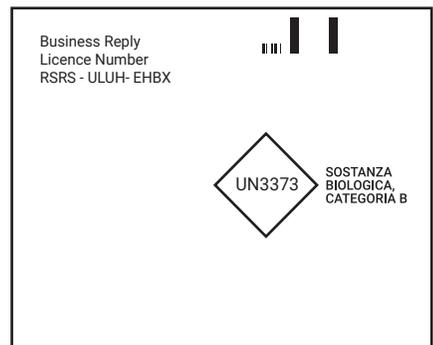

Confezione per restituzione al laboratorio

Passo 2 - Prelievo del campione di feci e riempimento della provetta di raccolta

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

Leggere tutte le istruzioni prima del prelievo

Sintesi e spiegazione del kit:

KnowMyGut fornisce i materiali e le istruzioni per la raccolta e la stabilizzazione del DNA microbico da campioni fecali.

Procedura:



PREPARAZIONI IMPORTANTI:

- Svuotare la vescica prima di iniziare la raccolta.
- Raccogliere il campione fecale senza urina o acqua di gabinetto.
- Potrebbero essere necessari carta igienica o fazzoletti.


Passo 2 - Prelievo del campione di feci e riempimento della provetta di raccolta

1



Aprire con attenzione il raccogliitore di feci e seguire le istruzioni stampate sul raccogliitore per posizionarlo sulla tavoletta del water.

2

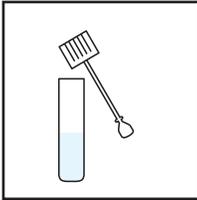

Dopo il movimento intestinale, svitare il tappo della provetta.


Fare attenzione a non versare o ingerire la soluzione all'interno.

3




Usare il cucchiaino per raccogliere un piccolo campione di feci. (circa la dimensione di un pisello).

4

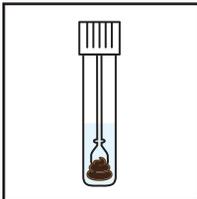

Inserire il campione fecale raccolto nella provetta di raccolta e avvitare saldamente.

5

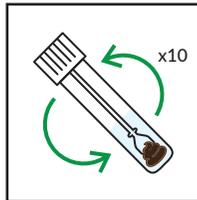

Assicurarsi che il tappo sia ben stretto e agitare per 10 secondi per miscelare.

6



Staccare il raccogliitore di feci dalla tavoletta del water

